

シリコーン吸着式前腕シルグローブ


ソフトソケット



完成用部品 No, 佐藤 370

- 肘頭及び顆部を柔軟なシリコーンソケットで覆い、上腕部に多少のコンプレッションを掛け、シリコーンとの摩擦力とで懸垂する。
- ソケットに柔軟性があり、肘関節屈曲、伸展が容易にできる。又、フレアがないため上腕部がすっきりする。
- 手先具はシルグローブ付で、リアルで汚れにくい。
- 断端袋を使用して装着可能。
- 防水インナーシリコーン付で水洗いでき清潔である。
- 手先具は、回転器及びパッシブハンドを内蔵することもできる。

手先具シルグローブ
内部は発泡樹脂

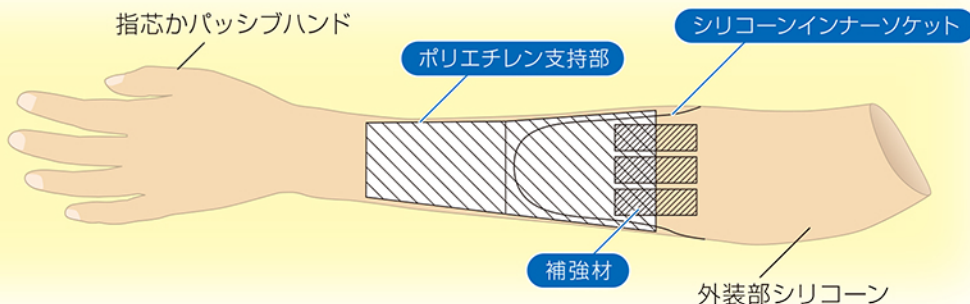


ソフトソケットご注文要項

完成後の修正が困難ですので、新規にご製作いただく際は
仮合わせと、事前の資料提供を十分お願いします。

必要資料

- 患手、健手のトレース図
- 無修正の患側陽性モデル
上腕部は、肘上10cm位まで採型して下さい。
肘の屈曲は、10～15°位で採型して下さい。
- 正確な患部の周径寸法
数ヶ所採寸して下さい。
- 色指定

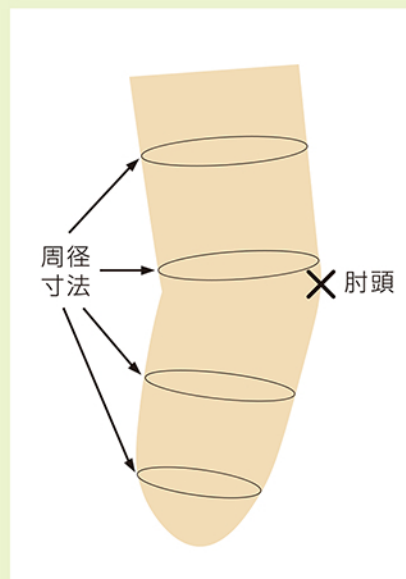

仮合わせ要項

仮合わせ時に、手先付のシリコンソケットをお送りしますので、
義手長、フィッティング等のチェックをしていただきます。

上腕部がきつい場合は、
シリコンソケットの上縁の肘頭前面入口部を、
フィッティングのいいところまで
U字にえぐりながらカットして合わせて下さい。

